



SE.Guldmann Service och Information Konsol v. 1.3.0

Brukarmanual - ver. 7.00

CE



Guldmann™

Guldmann Service och Information Konsol

Artikelnummer:

550640

1.0	Programinstallation	3
2.0	Köra programmet för första gången	4
2.1	Installera USB-drivrutinen	4
2.2	Ansluta lyften	4
3.0	CLM modul	6
3.1	Allmän information	6
3.2	Total livstidsaktivitet	6
3.3	Statistik	6
3.4	Importera CLM-data till Excel-kalkylblad	8
4.0	Service modul	10
4.1	Generell information	10
4.2	Total livstidsaktivitet	10
4.3	Serviceinformation	11

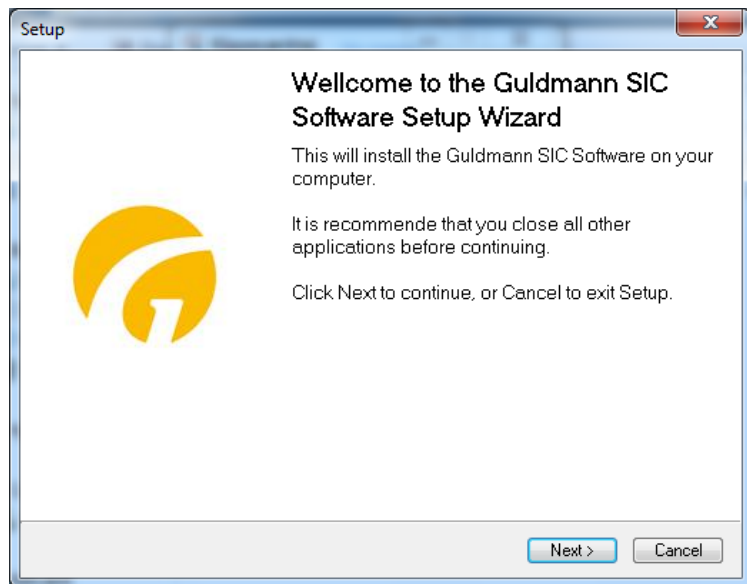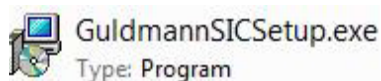

Om du är en certifierad Guldmann-tekniker väljer du installationsalternativet **"Tekniker version"**, vilket innebär att du får tillgång till avancerade funktioner i programmet. För att du ska kunna använda det här alternativet måste du ha en särskild aktiveringskod. Kontakta Guldmann för mer information om hur du får tillgång till koden.

2.0 Köra programmet för första gången


2.1 Installera USB-drivrutinen

Innan du kan köra programmet för första gången måste du installera USB-drivrutinen.


1. Leta rätt på USB-drivrutinen i mappen \Guldmann\Guldmann Service and Information Console\Drivers.

2.2 Ansluta lyften

1. Anslut lyften till datorn med anslutningskabeln.
Guldmann artikelnummer 550641.

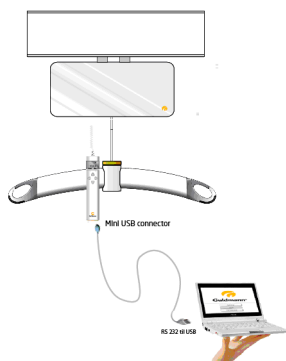

2. Aktivera lyften med lyftens handreglage.
3. Kör programmet Guldmann Service and Information Console.
4. Välj installationstyp och välj sedan
 - a. Enheter (kilogram eller lbs)
 - b. Serieport (välj från listan)
 - c. Språk

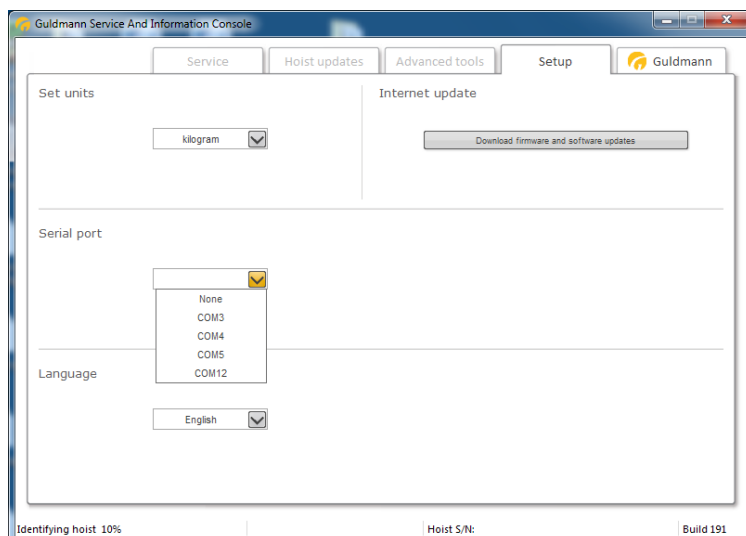

5. Efter anslutning till lyften är programmet redo att användas. Om inte, starta om programmet.

Beroende på vilken lyftmodell som används finns olika funktioner tillgängliga.

Tillgängliga funktioner

Funktion	Tekniker	Assistent
CLM	(√)	(√)
Service	√	(√)
Uppdatera lyft	√	
Avancerade verktyg	√	
Setup	√	√

(√), beroende på lyftens konfiguration.

CLM-modulen är bara tillgänglig om den anslutna lyften har stöd för CLM-funktionalitet. Om den är tillgänglig kan vissa ändringar göras.

Allmän information**Uppdatera tid**

Med den här knappen ändrar du lyftens tid- och datuminställningar till de värden som hämtas från datorns klocka. Lyftens datum och klockslag används för registrering av lyft.

Ändra lyft-ID

Den här knappen används för att ändra lyftens ID. Lyftens ID kan ses i handkontrollen om CLM modul är installerad.

Total livstidsaktivitet

De här räknarna sammanställer information om hur lyften har använts sedan den första installationen.

Statistik

De här räknarna visar information om hur mycket lyften har använts sedan räknarna senast nollställdes. Se nedan


Nollställ statistik

Den här knappen återställer alla räknare till 0. CLM-loggen påverkas inte.

Ladda ner CLM-logg


Med den här knappen hämtar du lyftens CLM-data. Loggen lagras i program-mappen för Guldmann Service and Information Console. Mappen är som standard: C:\Users\%Username%\AppData\Roaming\Guldmann\Guldmann Service and Information Console

För att enkelt hitta mappen skriv in sökvägen ovan i ett windows fönster.

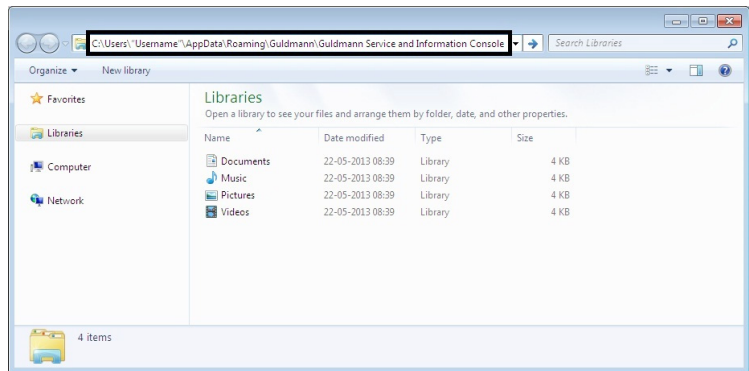

Rensa CLM logg


Den här knappen rensar CLM datan.

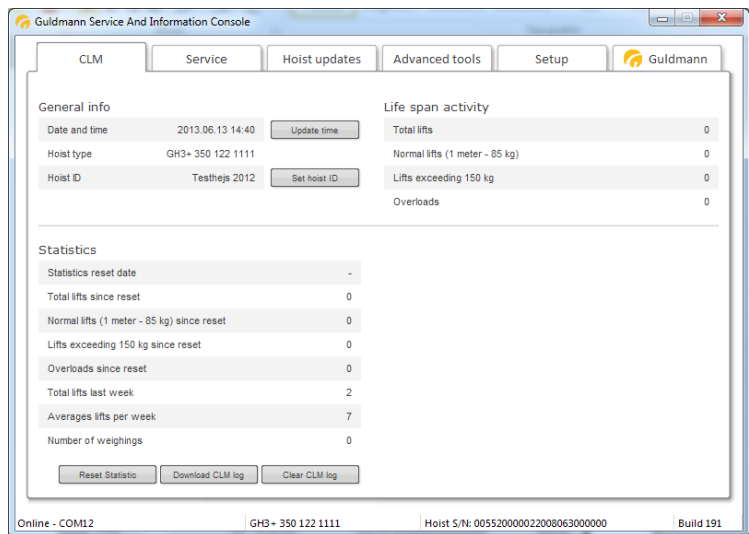

3.4

Importera CLM-data till Excel-kalkylblad

CLM datan lagras i en mapp nämnd "CLM LOG". Mappen ligger som standard i "Guldmann Service and Information konsol" program mapp. Varje lyft kommer automatiskt skapa en undermapp benämnd efter lyftens serienr. Informationen kan importeras till andra program, till exempel till Microsoft Excel.

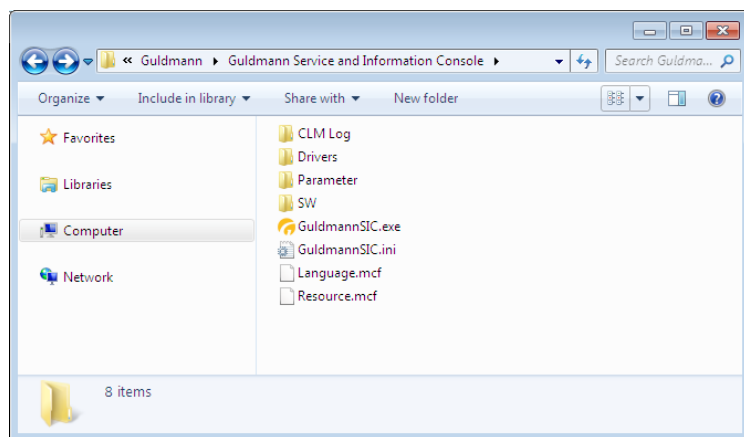

1. Starta Excel
2. Klicka på **"Arkiv"** – **"Öppna"**
3. Klicka på Alla filer (*.*) i rutan Filformat
4. Markera den aktuella loggfilen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Hoist ID: Testhejs 2012											
2	Date	Time	Duration	Weight	Height							
3	30-05-2013	11:18:01	2	305,9	15							
4	30-05-2013	11:19:18	18	82,4	111							
5	01-01-2012	10:01:45	5	82,6	33							
6	01-01-2012	10:04:19	1	83,6	10							
7	01-01-2012	10:05:10	3	82,6	22							
8	01-01-2012	10:15:13	1	82,5	10							
9	01-01-2012	10:16:29	1	83,2	8							
10	01-01-2012	10:26:03	3	82,4	18							
11	01-01-2012	10:32:46	1	82,9	7							
12	01-01-2012	10:33:14	3	83,6	18							
13	01-01-2012	10:33:26	5	81,9	30							
14	01-01-2012	10:33:37	3	83,2	18							
15	01-01-2012	10:33:46	3	82,3	18							
16	01-01-2012	10:40:25	1	3,6	8							
17	01-01-2012	10:45:14	3	2,5	17							
18	01-01-2012	10:46:05	1	82,9	5							
19	01-01-2012	10:46:20	1	84,8	6							
20	01-01-2012	10:46:36	1	82,9	5							
21	01-01-2012	10:46:49	1	84,2	7							
22	01-01-2012	10:46:58	1	83	6							
23	01-01-2012	10:47:12	1	83,2	9							
24	10-06-2013	16:04:49	3	130,4	13							
25	10-06-2013	16:05:09	1	18,5	8							

Den importerade informationen visas i följande format:

Kolumn A: lyftdatum

Kolumn B: lyfttid

Kolumn C: lyftets längd i sekunder

Kolumn D: lyftets vikt i kg

Kolumn E: lyftets höjd i cm

Observera!

Den inbyggda vågen i GH3+ är inte godkänd för att avgöra massa och vikt för medicinska ändamål, inklusive vägning av patienter i samband med hälsokontroller, diagnoser och behandling.

(Villkoren för vägning i medicinskt syfte specificeras i enlighet med EG-direktiv 90/384).

Vikt som visas i CLM programmet kan endast användas som indikation där lyften har en integrerad våg (våg cell).

Om lyften ej har en integrerad våg är vikten beräknad från kraft användning-
en under ett lyft.

Servicemodulen är bara tillgänglig för en certifierad tekniker som blivit tilldelad åtkomst.

Uppdatera tid

Med den här knappen ändrar du lyftens tid- och datuminställningar till de värden som hämtas från datorns klocka. Lyftens datum och klockslag används för registrering av lyft.

Lyftmodell/typ

Vilken typ av lyft som är ansluten.

Total livstidsaktivitet

De här räknarna sammanställer information om hur lyften har använts sedan den ursprungliga installationen.

Lyftbandsräknare och knappen "Byte band"

Den här räknaren ger information om lyftbandets förväntade återstående livslängd.

Räknarformat:

Antal lyft som gjorts med det aktuella lyftbandet/lyftbandets förväntade livslängd. Lyftbandet bör bytas ut om antalet lyft med det aktuella bandet börjar närma sig lyftbandets förväntade livslängd.

Kamremsräknare

Den här räknaren ger information om kamremmens förväntade livslängd.

Räknarformat:

Antal lyft gjorda med det aktuella lyftbandet/kamremmarnas förväntade livslängd.

Dessa bör ersättas om antalet lyft med de aktuella kamremmarna börjar närma sig dess förväntade livslängd.

Batteriräknare

Den här räknaren ger information om batteriets förväntade livslängd.

Räknarformat:

Byt ut batteriet om antalet gjorda lyft med det aktuella batteriet börjar närma sig dess förväntade livslängd.

Fel

De här räknarna ger information om hur många fel som uppstått sedan räknaren nollställdes.

4.3

Serviceinformation

Dessa datum och räkneverk lämnar information om användandet av lyften.

| Time to care |

V. Guldmann A/S

Huvudkontor:
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB

Smålandsgatan 4
S-441 57 Alingsås
Tel. +46 0322 55290
Fax +46 0322 55320
info@guldmann.se
www.guldmann.se